

Ремонт или замена, покрываемые гарантией должны производиться исключительно фирмой-производителем или ПРОДАВЦОМ, а все транспортные издержки покрывает ПОКУПАТЕЛЬ.

Примечания

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

**ВНИМАНИЕ: ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ**

Дата продажи

Подпись продавца

М.П.

**ТЕЛЕЖКА
КОСМЕТОЛОГА
«МД-105»
«МД-106»**



1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1 Косметологическая передвижная тележка «МД-105», «МД-106» предназначена для оснащения учреждений здравоохранения, парикмахерских, косметологических салонов.

2. ОПИСАНИЕ.

2.1 Каркас тележки выполнен из тонкостенного стального профиля с нанесением полимерного порошкового покрытия. Полка выполнены из металла, модуль с двумя выдвижными ящиками сделан из ЛДСП белого цвета.

2.2 Столик разборный на мебельных евровинтах. В качестве опор применяются пластиковые мебельные колёса.

2.3 Столик поставляется в разобранном виде.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3.1 Масса столика не более –15 кг

3.2 Номинальная нагрузка – 20 кг

3.3 Размер столика «МД-105» (ДхШхВ), мм - 550х400х830

3.4 Размер столика «МД-106» (ДхШхВ), мм - 530х400х820

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

4.1 Опора правая – 1 шт.

4.2 Опора левая – 1 шт.

4.3 Полка металлическая – 1 шт.

4.4 Колесо поворотное – 4 шт.

4.5 Винт – 4 шт.

4.6 Модуль с ящиками из ЛДСП – 1 шт.

4.7 Паспорт (инструкция по сборке) – 1 шт.

5. ПОРЯДОК СБОРКИ.

5.1 Ввернуть колёса в резьбовые отверстия опор

5.2 Соединить полку и боковые опоры евровинтами.

5.3 Собрать модуль с ящиками по приложению 1.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок, указанных в пункте 3.2

6.2 Для удаления загрязнений использовать влажную губку, смоченную в мыльном растворе. Растворитель не применять!!!

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

7.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи.

7.3 Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с подписью продавца, печатью торгующей организации или настоящий паспорт и товарно-транспортную накладную.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Сборка ящика к столикам косметолога «МД-105», «МД-106»

КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- 1 Бока модуля (400х320 мм) – 2 шт.
- 2 Верхняя крышка модуля (468х383 мм) – 1 шт.
- 3 Нижняя крышка модуля (468х383 мм) – 1 шт.
- 4 Задняя стенка модуля (468х330 мм) – 1 шт.
- 5 Направляющая ящика – 4шт.
- 6 Метабокс ящика – 4 шт.
- 7 Фасад ящика (465х130 мм) – 2 шт.
- 8 Дно ящика (435х345 мм) – 2 шт.
- 9 Задняя стенка ящика (435х70 мм) – 2 шт.
- 10 Евровинт 7х70 – 8 шт.
- 11 Заглушка для еврвинта – 12 шт.
- 12 Саморез 3,5х16 – 32 шт.
- 13 Евровинт 7х50 – 4 шт.
- 14 Ручка – 2 шт. (винты 4 шт. в комплекте с шайбами)
- 15 Шайба М8 – 8 шт.
- 16 Ключ для еврвинтов – 1 шт.

1.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1.1.1 Закрепить направляющие **(5)** для ящика (колёсами вперёд) к боковинам модуля **(1)** с помощью саморезов **(12)** по наколкам левый и правый (ролики должны находиться с той стороны, куда выдвигается ящик)

1.1.2 Собираем ящик: берём дно ящика **(8)** и метабоксы ящика **(6)** прикручиваем саморезами **(12)**, берём заднюю стенку ящика **(9)** и прикручиваем её саморезами **(12)** к метабоксам. Затем фасад ящика **(7)** по наколкам прикручиваем саморезами **(12)** к метабоксам. К фасаду ящика прикручиваем ручку **(14)** винтами из комплекта ручки, в винты вставить пластиковые шайбы.

1.1.3 Берём левую опору **(4.2)**, левый бок модуля **(1)**, верхнюю крышку модуля **(2)** крепим всё вместе через опору еврвинтами **(10)** с шайбами **(15)** при помощи ключа **(16)**, таким же образом крепим правую опору, таким же образом крепим нижнюю крышку модуля **(3)**. Заднюю стенку модуля **(4)** крепим к бокам еврвинтами **(13)**, устанавливаем на все еврвинты модуля декоративные заглушки **(11)**.

1.1.4 Вставляем ящики в модуль, фасады ящиков регулируем по высоте регулировочными винтами на метабоксах сбоку.