

**Ремонт или замена, покрываемые гарантией должны производиться исключительно фирмой-производителем или ПРОДАВЦОМ, а все транспортные издержки покрывает ПОКУПАТЕЛЬ.**

### **Примечания**

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

**ВНИМАНИЕ: ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ И  
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ**

Дата продажи

Подпись продавца

М.П.

**СТОЛИК КОСМЕТОЛОГА «МД-107»**

Изготовленно в России



## **1. НАЗНАЧЕНИЕ.**

1.1 Косметологический передвижной столик «МД-107» с 2-мя ящиками предназначен для оснащения учреждений здравоохранения, парикмахерских, косметологических салонов.

## **2. ОПИСАНИЕ.**

2.1 Каркас столика выполнен из тонкостенного стального профиля с нанесением полимерного порошкового покрытия. Выдвижные ящики изготовлены из ламинированного ДСП с декоративной кромкой.

2.2 Столик разборный на мебельных евровинтах. В качестве опор применяются пластиковые мебельные колёса.

2.3 Столик поставляется в собранном и разобранном виде.

## **3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

- 3.1 Масса столика не более – 15 кг
- 3.2 Номинальная нагрузка – 20 кг
- 3.3 Размер столика (ДхШхВ), мм – 550х410х780

## **4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.**

- 4.1 Опора правая – 1 шт.
- 4.2 Опора левая – 1 шт.
- 4.3 Заглушка 20х20 – 4 шт.
- 4.4 Ящик – 2 шт.
- 4.5 Колесо поворотное – 4 шт.
- 4.6 Втулка под лампу-лупу – 1 шт.
- 4.7 Винт-конфирмат 7х70 – 16 шт.
- 4.8 Заглушка для винта-конфирмата – 16 шт.
- 4.9 Ключ внутренний шестигранный 6 – 1 шт.
- 4.10 Паспорт (инструкция по сборке) – 1 шт.

## **5. ПОРЯДОК СБОРКИ.**

- 5.1 Собрать ящики согласно приложению №1
- 5.2 Закрепить ящики винтами-конфирматами к опорам
- 5.3 Ввернуть колёса в резьбовые отверстия опор
- 5.4 Вставить заглушки в гнезда винтов-конфирматов



## **6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 6.1 Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок, указанных в пункте 3.2
- 6.2 Для удаления загрязнений использовать влажную губку, смоченную в мыльном растворе. Растворитель не применять!!!

## **7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

- 7.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи.
- 7.3 Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с подписью продавца, печатью торгующей организации или настоящий паспорт и товарно-транспортную накладную.

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Сборка ящиков к столику косметолога «МД-107»

### КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- 1 Бока модуля (390x170 мм) – 4шт.
- 2 Верхняя крышка модуля (468x390 мм) – 2 шт.
- 3 Нижняя крышка модуля (468x370 мм) – 2 шт.
- 4 Задняя стенка модуля (500x170 мм) – 2 шт.
- 5 Направляющая ящика – 4шт.
- 6 Метабокс ящика – 4 шт.
- 7 Фасад ящика (465x132 мм) – 2 шт.
- 8 Дно ящика (435x345 мм) – 2 шт.
- 9 Задняя стенка ящика (435x70 мм) – 2 шт.
- 10 Винт-конфирмат 7x50 – 8 шт.
- 11 Заглушка для винта-конфирмата – 8 шт.
- 12 Саморез 3,5x16
- 13 Саморез 3,5x16 (цинк)
- 14 Ручка – 2 шт. (винты 4 шт. в комплекте)
- 15 Шайба пластиковая под винт ручки – 4 шт.

### 1.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1.1.1 Закрепить направляющие (5) для ящика (колёсами вперёд) к боковинам модуля (1) с помощью саморезов (13) по наколкам левый и правый (ролики должны находиться с той стороны, куда выдвигается ящик)

1.1.2 Собираем ящик: берём дно ящика (8) и метабоксы ящика (6) прикручиваем саморезами (12), берём заднюю стенку ящика (9) и прикручиваем её саморезами (12) к метабоксам. Затем фасад ящика (7) по наколкам прикручиваем саморезами (12) к метабоксам. К фасаду ящика прикручиваем ручку (14) винтами из комплекта ручки, в винты вставить пластиковые шайбы (15).

1.1.3 Берём левую опору (4.2), левый бок модуля (1), верхнюю крышку модуля (2) крепим всё вместе через опору винтами-конфирматами (4.7) при помощи ключа (4.9), таким же образом крепим правую опору, таким же образом крепим нижнюю крышку модуля (3). Заднюю стенку модуля (4) крепим к бокам винтами-конфирматами (10).

1.1.4 Вставляем ящик в модуль, фасад ящика регулируем по высоте регулировочными винтами на метабоксах сбоку.

Схема сборки метабокса

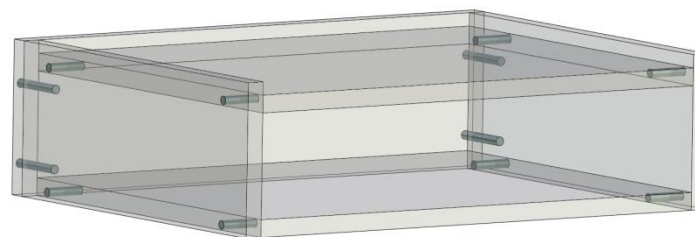


Схема сборки ящика

