

# **Инструкция по эксплуатации**

## **Стол массажный с механической регулировкой**

### **FM3**



## Содержание:

1. Назначение изделия
2. Рисунок изделия
3. Комплектация
4. Технические характеристики
5. Установка и эксплуатация
6. Гарантия изготовителя

### 1. Назначение изделия

Массажный стол с механической регулировкой «FM3» (далее изделие) предназначен для проведения различных видов массажа, мануальной терапии и косметологических процедур.

### 2. Рисунок




### 3. Комплектация

1. Механический привод «Гелиокс» – 1шт
2. Бесступенчато регулируемые передние подлокотники – 2шт
3. Подголовник с фиксирующим механизмом – 1шт
4. Механизм фиксации подголовника для массажа воротниковой зоны – 1шт
5. Регулируемые опоры – 4шт
6. Боковые поддержки для рук – 2шт
7. Рукоятка механического привода – 1шт
8. «Ножная» регулируемая секция ложа массажного стола -1шт
9. Средняя «спинная» секция ложа массажного стола – 1шт

### 4. Технические характеристики

1. Габариты изделия (основные размеры в мм):

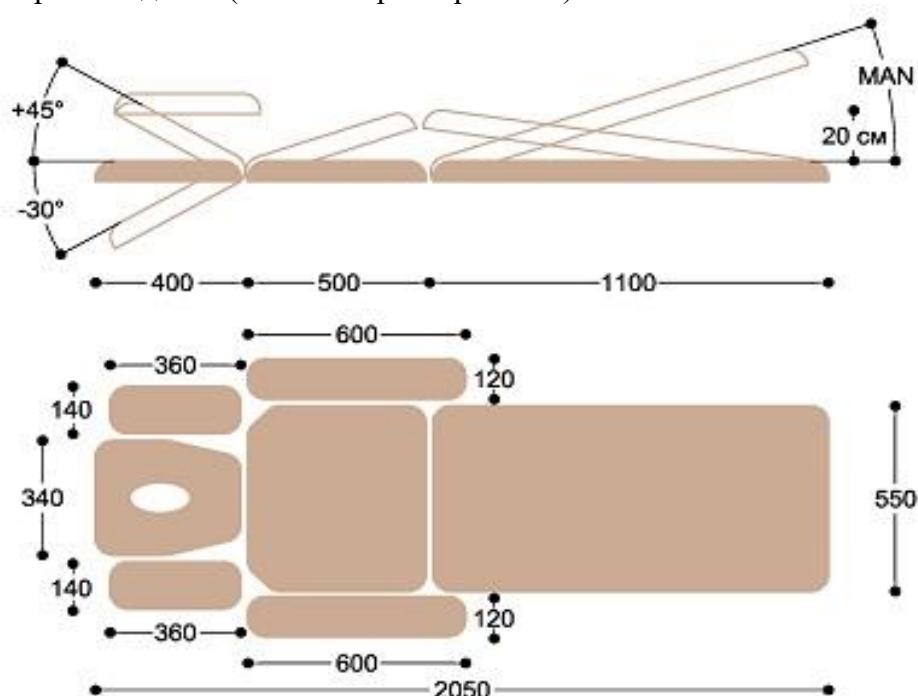

2. Масса изделия – не более 75кг
3. Максимальная нагрузка до 200кг
4. Толщина мягкой части ложа – 50мм
5. Покрытие каркаса стола – полимерная порошковая окраска

**Внимание!** Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию массажного стола без дополнительного уведомления потребителей.

## 5. Инструкция по установке и эксплуатации

1. Установите стол и зафиксируйте его с помощью регулируемых опор (5 см. рисунок) во избежание его перемещения в вертикальной плоскости. Не передвигайте и не регулируйте массажный стол при слишком натянутом или зажатом электрошнуре.
2. Установка необходимой высоты стола производится с помощью механического привода (без нагрузки), путём вращения рукоятки привода (7)  
**Внимание!** Регулировка высоты стола производится при отсутствии пациента или тяжёлых предметов на изделии.
3. По необходимости Вы можете установить «ножную» секцию лежа в удобное положение с помощью механического упора.
4. По необходимости Вы можете установить двухсекционное ложе стола в положение дренаж (домиком) с помощью механического упора, при опущенной «ножной» секции.
5. По необходимости Вы можете использовать боковые поддержки для рук (6), для этого их необходимо поднять до горизонтальной плоскости лежа (8) и сдвинуть вперёд до упора.
6. Передние подлокотники (2) регулируются бесступенчато при помощи винтового фиксатора.
7. Для установки подголовника (3), на требуемый угол наклона необходимо нажать вниз на рычаг фиксирующего механизма подголовника, расположенного под передней частью головной секции и после установки нужного положения отпустить этот рычаг.  
**Внимание!** Головная секция и подлокотники не предназначены для удержания всей массы человека и должны использоваться по назначению.  
**Внимание!** Модели, оснащённые колёсной базой не предназначены для перевозки пациентов.
8. По необходимости, Вы можете использовать подголовник для массажа «воротниковой» зоны, для этого необходимо установить отрицательный угол наклона подголовника и с помощью механизма фиксации подголовника для массажа воротниковой зоны (4) установить головную часть в удобное положение.
9. Изделия предназначены для использования внутри помещений с относительной влажностью 30%-60% и температурой от +10<sup>0</sup>С до +40<sup>0</sup>С.
10. При проведении обслуживания, мойке или перемещения стола обязательно выдерните шнур питания из розетки.
11. Покрытие из кожзаменителя, раму, переключатели и педали управления мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе нейтрального моющего средства в тёплой воде или, воспользуйтесь специальными средствами для ухода за кожзаменителем.  
**Внимание!** Никогда не используйте органические растворители, абразивные, хлоро- и аммиаксодержащие вещества.  
**Внимание!** В процессе эксплуатации старайтесь ограничить попадание масел и других косметологических средств на поверхность стола – это продлит срок службы кожзаменителя. Старайтесь использовать специальные полотенца и простыни.
12. В процессе эксплуатации пыль может оседать на механическом приводе, осторожно удалите её с помощью сухой тряпки или пылесоса.
13. Если вы не собираетесь использовать изделие продолжительное время, вымойте его, просушите, опустите до минимальной высоты, накройте непрозрачной плёнкой.
14. Если стол при поднятии/опускании издает скрип необходимо смазать все шарнирные элементы смазывающей жидкостью, например, литол.
15. Хранение массажного стола должно проходить в месте, где нет прямых солнечных лучей, нормальная влажность и температура, следите, чтобы на поверхность не устанавливали предметы, которые продавят или повредят покрытие из кожзаменителя.

## 6. Гарантийные обязательства

1. В случае возникновения неполадок в течении гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении дефектов сборки, производитель, его представительство, авторизованный сервисный центр или уполномоченное лицо обеспечит замену деталей, необходимых для устранения дефекта.
2. Гарантия на отсутствие дефектов производства, препятствующих нормальной работе изделия, составляет 24 месяца.  
Срок службы изделия более 7 лет.
3. Настоящая гарантия не может быть применена к дефектам, вызванным неправильным использованием или применением не по назначению, ненадлежащим содержанием, падением или ударом, неправильным обслуживанием, повреждением от замерзания или использованием с нарушениями требований инструкции по эксплуатации.
4. В гарантийный ремонт не принимается оборудование, имеющее внешние механические повреждения.
5. Гарантия не распространяется на искусственную кожу, для покрытия товара.
6. Повреждения, возникшие в результате применения приспособлений, принадлежностей или расходных материалов иных, чем предлагаются производителем(продавцом), а также в случае внесения самовольных изменений в конструкцию изделия или производство самостоятельного ремонта, не могут рассматриваться как гарантийный случай.
7. Настоящая гарантия выдаётся представителю организации, которая приобретает оборудование и не может быть передана другому лицу или организации.
8. Продавец(производитель) снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделием людям или имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц.
9. Продавец(производитель) ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за любые побочные, косвенные, особые, не прямые, штрафные или дисциплинарные виды ущерба или за потерю прибыли вследствие нарушения условий настоящей гарантии или иных обстоятельств.

Наименование изделия	Дата продажи	Наименование и печать торгующей организации
Массажный стол с механической регулировкой, модель FM3		