

ПАСПОРТ

ВНИМАНИЕ: перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Нарушение требований вышеуказанной инструкции влечёт за собой прекращение гарантийных обязательств перед покупателем.

Стул круглый для массажиста



Назначение:

Предназначены для размещения медицинского персонала и отдыха пациентов, помогают массажисту избегать чрезмерной нагрузки, дают отдых ногам и снимают усталость с рук

Показания к применению:

Применяют для отдыха и снижения нагрузки на массажиста и другой медицинский персонал.

Ограничения и противопоказания к применению:

Отсутствуют

Требования к персоналу, эксплуатирующему данное изделие:

Требований в данном разделе нет

Правило использования:

Перед использованием снимите с изделия полиэтиленовый мешок.

При температуре воздуха ниже 1°C возможно уплотнение пенополиуретана. Поэтому не рекомендуется использовать стулья при температуре ниже 1°C более 1 часа. Свойства пенополиуретана восстанавливаются после нагревания подушки стула до комнатной температуры.

Для предотвращения деформации изделия не следует скручивать или складывать

Изделие требует своевременной (в зависимости от загрязнения) стирки, дезинфекции и сушки

Правила ухода за изделием:

Чистку изделия нужно осуществлять только с использованием специальных щадящих чистящих средств, не содержащих хлора и органические растворители
Способ дезинфекции – следует провести двукратное протирание с интервалом в 15 минут дезинфицирующими средствами.

Гарантия производителя:

Гарантийный срок на изделие: 1 год.

Срок службы: не менее 1 года.

При использовании подушки свыше срока службы возможна деформация изделия и снижение лечебного эффекта.

Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффективное и безопасное использование изделия.

Гарантия не распространяется на искусственную кожу, для покрытия товара.

Условия хранения:

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования:

Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах

Способ утилизации:

Изделие утилизируется вместе с бытовым мусором.